



## Hur mäter jag rätt?

7725

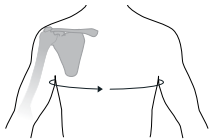


**AXEL**  
Mät omkretsen strax ovanför bysten.

7726

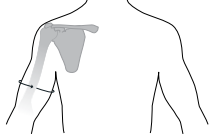

**AXEL**  
Mät omkretsen runt överarmen enligt bilden.

7720  
7721  
7722  
7723  
7721W  
7727  
7791  
7921

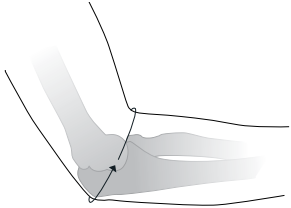


**ARMBÅGE**  
Vid mätning se till att armbågen är lätt böjd (ca 30° flexion). Mät omkretsen i höjd med armbågsvecket.

7415  
7710  
7711  
7793  
7910




**HAND**  
Vid mätning håll handleden i neutral position. Mät omkretsen runt handleden enligt bilden.

7730  
7732  
7792  
7930  
7785  
7786  
7788  
7787  
7981

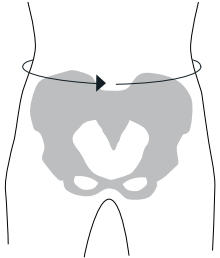

**RYGG**  
Mät i stående position. Mät över magens bredaste omkrets.

7785W

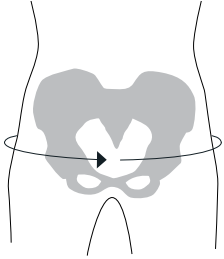


**HÖFT**  
Mät i stående position. Mät omkretsen runt höften enligt bilden.

7740  
7940




**LÅR**  
Vid mätning se till att knäleden är lätt böjd (ca 30° flexion), mät omkretsen runt låret på det stället där omfånget är som störst.

7456  
7757




**KNÄ**  
Vid mätning se till att knäet är lätt böjd (ca 30° flexion), utgå från centrala delen av patella och mät omkretsen runt knäleden.

7750 7751  
7752 7754  
7763 7765  
7781 7782  
7751W  
7753W  
7790  
7952  
7953

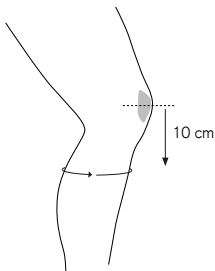


**KNÄ**  
Vid mätning se till att knäet är lätt böjd (ca 30° flexion), utgå från centrala delen av patella och mät runt benet 10 cm nedan patella.

7756  
7758  
7760  
7760W  
7960

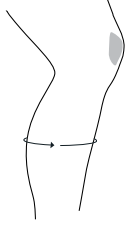


**VAD**  
Vid mätning se till att knäet är lätt böjt (ca 30° flexion), mät omkretsen runt underbenet på det stället där omfånget är som störst.

7973



**FOT/ANKEL**  
Vid mätning skall fotens undersida vara i kontakt med golvet, mät omkretsen runt fotryggen enligt bilden.

7651 7761  
7770 7771  
7772



**FOT/ANKEL**  
Skostorlek.

		<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>	<b>XXXL</b>	<b>XXXXL</b>
<b>TOP</b>	7725		86-92	92-98	98-104	104-110	110-116	116-122	122-128
<b>AXEL</b>	7726		27-29	29-31	31-33	33-35			
<b>ARMBÅGE</b>	7720, 7721, 7722, 7723	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32	32-34		
	7721W		21-23	23-25	25-27	27-29			
	7727		19-20,5	20,5-22	22-23,5				
	7791		24-26	26-28	28-30	30-32	32-34		
	7921	21-23	23-25	25-28	28-31	31-33			
	7923	UNIVERSAL							
<b>HANDLED</b>	7415	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22			
	7710		14-18		18-22				
	7711		15-16,5	16,5-18	18-19,5	19,5-22			
	7793		15-16,5	16,5-18	18-19,5	19,5-22			
	7910	UNIVERSAL							
<b>RYGG</b>	7730, 7732		64-72	72-80	80-90	90-100	100-110		
	7792			72-80	80-90	90-100	100-110	110-120	
	7930		64-72	72-80	80-90	90-100			
<b>BYXA</b>	7785	61-69	69-77	77-85	85-95	95-105	105-115		
	7786, 7788		69-77	77-85	85-95	95-105			
	7785 W	84-90	90-96	96-102	102-110	110-118			
	7787		69-77	77-85	85-95	95-105	105-112	112-120	
	7981	60	70	80	90	100			
<b>LÅR</b>	7740	45-48	48-51	51-54	54-57	57-61	61-65		
	7940	46-48	48-50	50-52	52-54	54-56			
<b>KNÄ</b>	7456		30-33	33-36	36-39	39-42			
	7750, 7751, 7752, 7754, 7763, 7781, 7782	31-33	33-35	35-37	37-40	40-43	43-46		
	7751 W, 7753 W	30-32	32-34	34-36	36-38	38-40			
	7757	27-35		35-43					
	7765, 7790		33-35	35-37	37-40	40-43	43-46		
	7952		26-27	27-28	28-30	30-32			
	7953	28-30	30-33	33-36	36-39	39-42			
<b>VAD</b>	7756		34-36	36-38	38-41				
	7758		34-36	36-38	38-41	41-44			
	7760		34-36	36-38	38-41	41-44	44-47		
	7760 W, 7960		33-35	35-37	37-39	39-41			
<b>FOT/ANKEL</b>	7651	Shoe size	35-37	37-39	39-40	40-42	42-44		
	7761, 7770, 7771	Shoe size	35-37	37-39	39-41	41-43	43-46		
	7772	Shoe size		36-41	41-46				
	7973		19-20	20-22	22-24	24-26	26-28		