



Relieve. Recover. Restore

Hi5 NASSA 3D Portabel Smart Massageapparat med värme



Tack för att du har köpt en Hi5-NASSA portabel smart massageapparat med värme.

Den här produkten är en praktisk massageapparat med hälsofördelar för hela kroppen. Användning av produkten kan lindra smärtor och trötthet så att du känner dig frisk och avslappnad.

Produkten utför 3D artificiell shiatsumassage med hjälp av flera olika massagelägen och varm kompression, vilket ger dig en unik och avslappnande upplevelse.

SV

Tack för att du har köpt den här produkten

Njut av livet

Vänligen läs noga igenom och spara
bruksanvisningen innan du
använder produkten.

Användning

SV



1. Den här produkten har fyra massagelägen. Tryck på ström/läge-knappen för att växla mellan dem.
2. Värme: Starta eller pausa värmen, inga värmelägen.

Funktioner


Den här produkten är en praktisk massageapparat som är utformad för problem med nacke och kropp. Genom att trycka på, värma och massera bindvävshinnan, akupunkter och muskler, slätas bindvävshinnan ut och tillför tillräckligt mycket blod till hjärnan för att lindra smärta och stelhet.

Egenskaper och funktioner

SV

1. Produkten är belagd med otroligt hållbar och robust ABS-PC-komposit.
2. Massagehuvudet är klätt i ett antibakteriellt lycramaterial som gör ytan elastisk och skön mot huden, vilket gör massagen ännu mjukare och bekvämare.
3. Den här produkten utför 3-dimensionell, artificiell shiatsumassage på ett ergonomiskt sätt, och kan justeras efter dina behov för att massagen ska bli så skön som möjligt.
4. Värmefunktionen hjälper kroppen att slappna av och lindra trötthet.
5. De omväxlande cirkulära rörelserna ger nacken en unik upplevelse.
6. Produkten stänger av sig automatiskt efter 15 minuter.

Vänligen montera handremmen innan produkten används för första gången

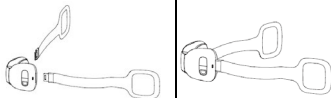

Laddning

1. Under laddning blinkar batteriindikatorn i olika steg.
2. När batteriet är fulladdat når indikatorn den högsta nivån och slutar blinka.
3. Vid lågt batteri kommer indikatorn att blinka och apparaten ge ifrån sig ett långt ljud varannan minut. Apparaten kommer att ge ifrån sig tre pip och automatiskt att stänga av sig när batteriet tar slut.
4. Ett fulladdat batteri räcker till ungefär 3 timmars drift.

SV

Specifikationer

1. Produktnamn: Hi5 NASSA 3D Portabel Smart Massageapparat med värme
2. Laddningsspänning: DC 5V = 1A
3. Nominell effekt: 5W
4. Strömtillförsel: inbyggt litiumbatteri 3,7V/2200mAh
5. Laddning: Allmän laddningsport för USB-C för mobiltelefoner

Användarprofil

1. Kontorsarbetare som sitter framför datorn under långa perioder.
2. Personer som sitter eller står i samma ställning under långa perioder.
3. Personer som är oroliga, sover dåligt eller har svårt att fokusera.
4. Personer med stela och trötta muskler
5. Personer med smärta, känselbortfall och trötthet i händerna.
6. Personer med otillräcklig syretillförsel till hjärnan.

Förvaring och underhåll

1. Placera inte apparaten nära mark, väggar eller tak.
2. Produkten bör förvaras i ett välventilerat rum utan direkt solljus och starka dofter.
3. Produkten är utrustad med en enkel antivibration, vilket gör den lämplig för flyg, tåg, väg och transport. Regn, snö, stänk, skakningar och hårda slag bör undvikas.

Underhåll

1. Undvik att fukt, skadedjur och föroreningar kommer i kontakt med produkten.
2. Produkten ska vara avstängd vid rengöring av handtaget.
3. Placera alltid produkten på en säker plats efter användning. Placera aldrig tunga föremål ovanpå produkten.
4. Kontakta alltid behöriga tekniker om fel skulle uppstå på produkten, försök aldrig montera isär eller reparera produkten själv.

SV

OBS!

1. Använd aldrig produkten i varma och fuktiga miljöer.
2. Placera produkten på kroppen innan du startar den.
3. Personer med inflammationer, förstoppning eller andra svåra symtom, eller personer som har genomgått operationer, ska inte använda produkten.
4. Personer som lider av högt blodtryck eller psykiska sjukdomar ska inte använda produkten.
5. Den här produkten är en personvårdsprodukt och kan inte ersätta kontakt med eller behandling av sjukvårdspersonal.
6. Rengör produkten vid behov med en bomullstuss fuktad med ett naturligt rengöringsmedel. Rengör aldrig produkten med vatten.

Garanti

Den här produkten omfattas av en garanti under ett år från inköpsdatum. Garantin täcker defekter i material eller tillverkning, och hi5 kommer att reparera eller ersätta produkten eller tillhandahålla nödvändiga ersättningsdelar utan kostnad.

Den här garantin gäller inte för:

- a) Skador som uppstår på grund av olycka, missbruk, felhantering eller transport;
- SV** b) Obehörig reparation;
- c) Felaktig användning av produkten;
- d) Skador som överstiger kostnaden för produkten;
- e) Förslitningsskador på den levererade produkten som orsakats av felaktig förvaring och/eller användning;
- f) Underlåtenhet att tillhandahålla ett daterat inköpsbevis.